

Yüzeylerin
kontaminantlara
karşı
kontrolünü
Takip edin



PROTEİN KALINTI TESTİ

SM1300 sistemi gerçek zamanlı çalışan, yıkama sonrası ulaşılması zor bölgeler dahil olmak üzere yüzeyler üzerindeki protein, allerjen ve diğer ajanların tespit edilmesine yönelik bir hijyen kontrol sistemidir. Sistem aynı etkinlikte farklı yüzeylerden numune alınmasına izin veren yüksek absorpsiyonlu bir tutucuya haizdir.



Test edilecek alana
pamuk çubuğu sürünüz.



Pamuk çubuğu tüpün içine
koyunuz ve kapağı kapatınız.



10 saniye çalkalayınız.



Tüpü ters çeviriniz ve
sonucu görmek için bekleyiniz.



Renk değişikliği yok ise protein tespit edilmemiştir.
Yüksek miktar proteinde test sıvısıda mor renge döner.

Avantajlar

- İnkübasyona gerek duymadan 10 saniye içerisinde kesin sonuç verir.
- Gerçekleşen renk değişikliği ile protein varlığı hakkında kesin bilgi verir.
- 1 µg kadar proein varlığını yakalayabilir.

SM1300

ENDOSKOP SWAB

Endoskop ve ulaşılması güç kanalları veya kanülleri bulunan tekrar kullanılabilir aletlerin numune alınması için uygundur. Bu numune alıcılar 2,3 metre uzunluğunda olup örneklemeden sonra ucu kesilerek test solüsyonuna konulmalıdır.

